

Conozca nuestra línea de ortodocia invisible

Alineadores 3D

Especializados y de alta precisión para el bienestar de sus pacientes



¿Cómo inicio un caso de alineadores?

¿Cómo inicio un caso de alineadores?

- 1** Enviar archivos .stl, fotos y radiografías del paciente a orthorich3d@gmail.com
- 2** Solicitar nuestra planeación.
4 días hábiles para la planeación después del pago. Tiempo susceptible a cambios.
- 3** Recibir la planeación y confirmar el número de pasos que desea que sean fabricados inicialmente (ejemplo: "fabricar los primeros 6 pasos" de un caso de 18 pasos).
- 4** Recibir los alineadores de su paciente.
4 días hábiles desde la confirmación y el pago. Tiempo susceptible a cambios.

Consideraciones para iniciar un caso

Para iniciar la planeación se debe **primero efectuar el pago.**

Para iniciar la fabricación tras la aprobación del doctor se debe **especificar el número pasos iniciales a fabricar o la totalidad del caso.**

Previo a la entrega se debe realizar el **pago de los alineadores fabricados.**



¿Cuanto cuestan los alineadores?

¿Cuanto cuestan los alineadores?

Servicio general

Planeación con Set-up Digital.....	\$330.000
Alineador c/u (PETG).....	\$82.000
Alineador c/u (Poliuretano).....	\$92.000

Servicios adicionales

Reemplazo de Alineador (PETG).....	\$55.000
Refinamiento o replanificación digital.....	\$140.000
Después Alineador #33 del mismo paciente.....	10% descuento

¿Cuanto cuestan los alineadores?

Precios de referencia

	PETG	Poliuretano
1 alineador	\$82.000	\$92.000
10 alineadores	\$820.000	\$920.000
20 alineadores	\$1.640.000	\$1.840.000
30 alineadores	\$2.460.000	\$2.760.000
40 alineadores	\$3.280.000	\$3.680.000

A partir de los 33 alineadores del mismo paciente recibe 10% de descuento

Un alineador cuenta como un superior o un inferior, no ambos.

**¿Qué tengo que enviar para
iniciar el proceso?**

¿Qué tengo que enviar para iniciar el proceso?

Necesario

Escaner Intraoral

Archivo **STL** al correo:
orthorich3d@gmail.com

¿Dónde lo puedo hacer?
En un centro radiológico
solicitando el paquete para
Ortodoncia Invisible.

Prescripción

con las indicaciones correspondientes

Preferible

Fotos mordida

Frente
Derecha
Izquierda
Max. superior
Max. inferior


Radiografía

Panorámica y de
perfil

Fotos faciales

Frente
Sonrisa
Perfil

Planeación

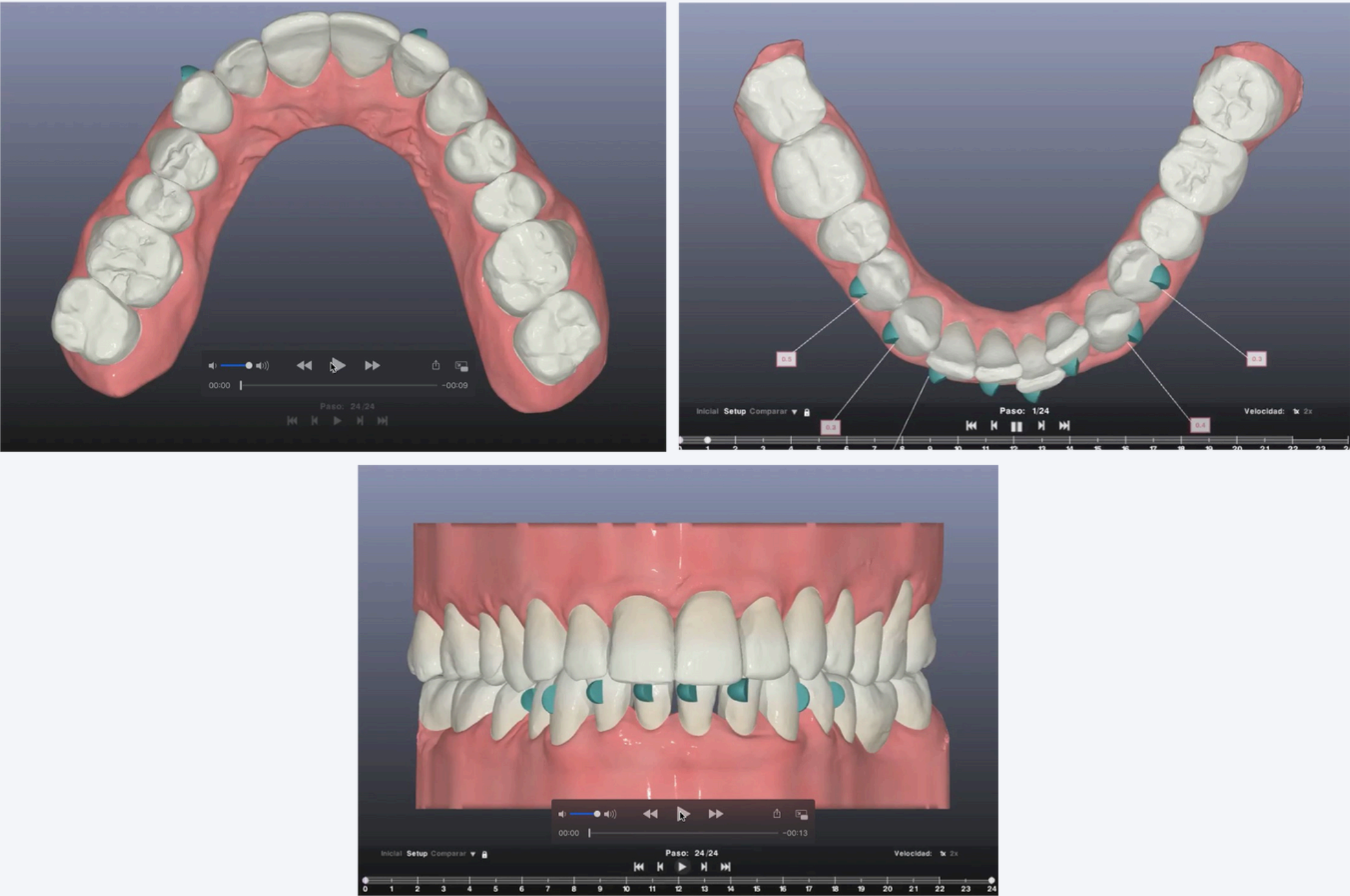

GUÍA DE TRATAMIENTO

Paciente : **OLMER RICO**

Doctor : **ORTORICH**


Clínica : **LABORATORIO ORTORICH & DENTAL**

Tipo de Tratamiento : **Nº Alineadores 22 Sup, 24 Inf**

Fecha : **31/10/2022**

x.x mm < y	Reducción	Power Ridge Externo	Punto de Presión Externo
Interproximal Total		Power Ridge Interno	Punto de Presión Interno
Antes de la Etapa		Attach	Ausencias
		Attach Bite Ramp	Pónticos
		Attach Corte de precisión	
		Attach tapones oclales	

Movilización						0.0	-0.4	-0.5	0.4	0.0	-0.1	-0.6	-1.0	-1.0	-1.2	
Verticalización						1.1	0.7			1.0	-0.1	1.7	0.4		-1.2	
Intrusión						0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	0.2	0.7	0.2	0.2	0.4	
Torque						7.0°				-0.2°	0.3°	21.0°		4.0°	2.0°	
Tip						-4.0°	-1.0°	0.3°		1.0°		0.4°			3.0°	
Rotación						-4.0°			-1.2°	-6.7°		-0.1°			0.1°	
	16	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28


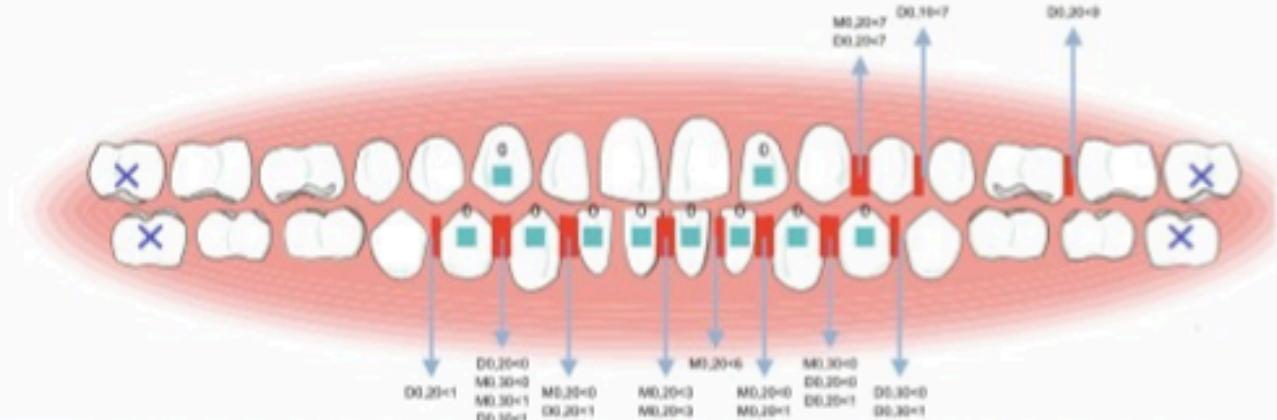


	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Rotación					13.0°	9.2°	6.4°	9.0°	-9.7°	-7.0°	21.0°	13.1°				
Tip					0.0°	0.0°	-0.3°				2.3°	-1.0°				
Torque				4.0°	4.0°	4.0°	0.1°	4.0°		10.3°	1.1°	16.0°				
Intrusión				0.7	0.5	0.6	-0.5	0.7	0.5	1.4	1.1	1.1				
Verticalización			0.2	0.5	0.2	1.8	0.5	0.5	-0.1	1.6	1.0	2.4				
Movilización				0.0	0.0	-0.7	-1.2	-1.2	0.5	-0.5	-0.7	-0.5				



La planeación se realizó con limitaciones ya que la paciente presenta implantes y coronas. Podría requerir nuevo escaner para evaluar los movimientos del caso. El uso de los alineadores es de 22 horas al día y se deben cambiar cada 20 días. Observar el video y realizar el IPR indicado en el reporte para garantizar los movimientos.

Caso de 33 alineadores adulto

Antes

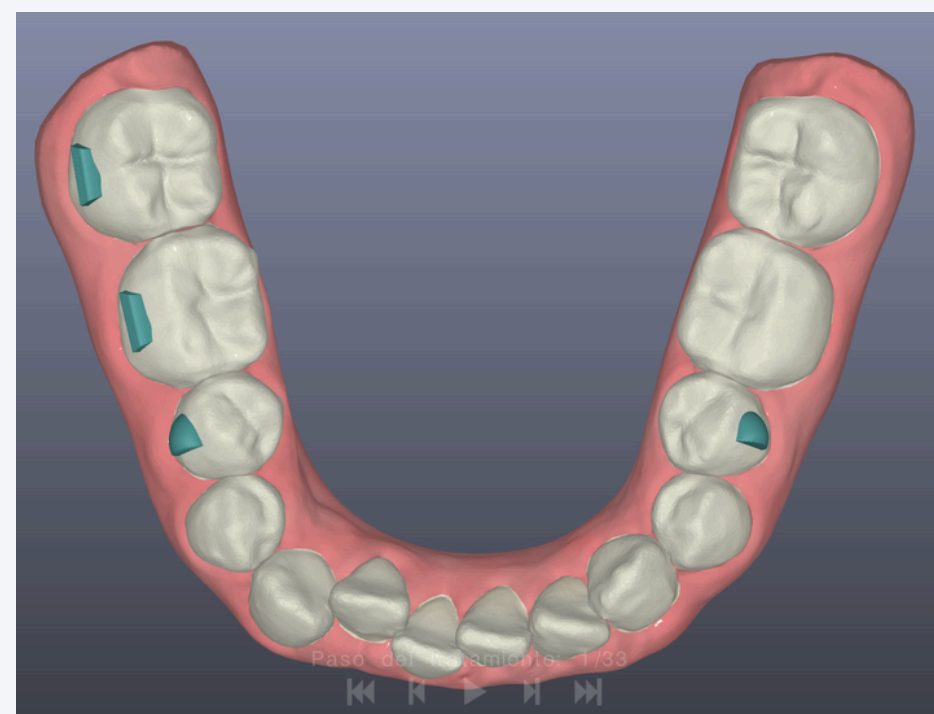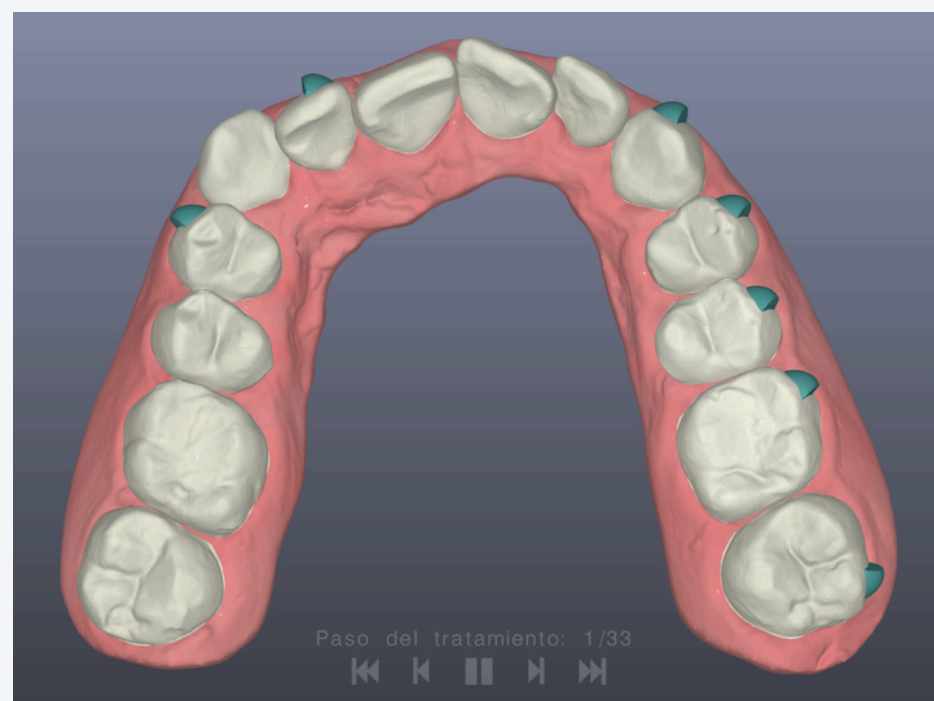

Después

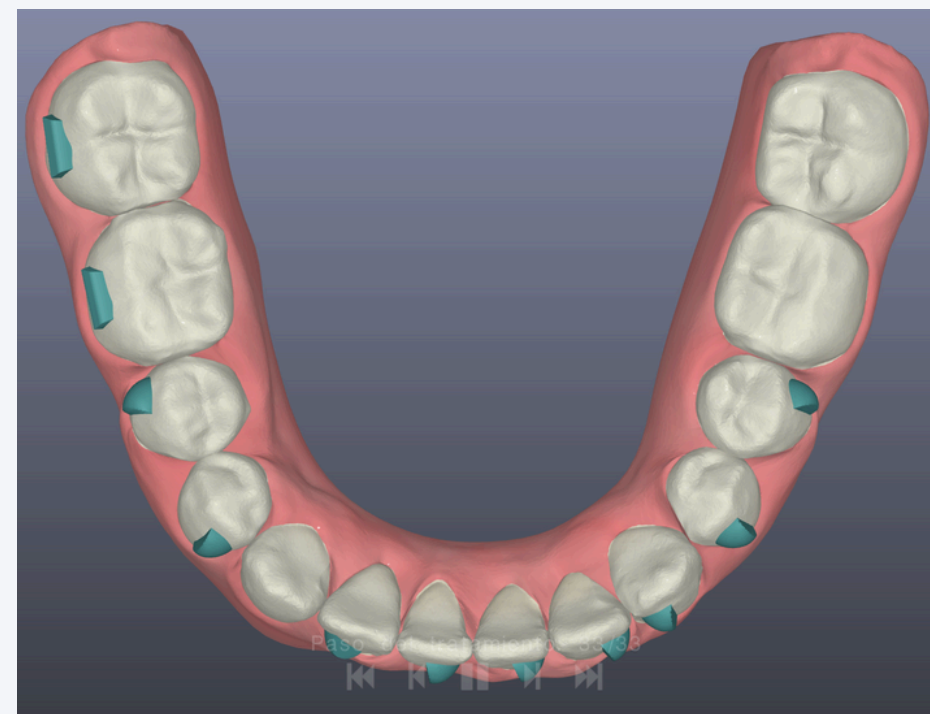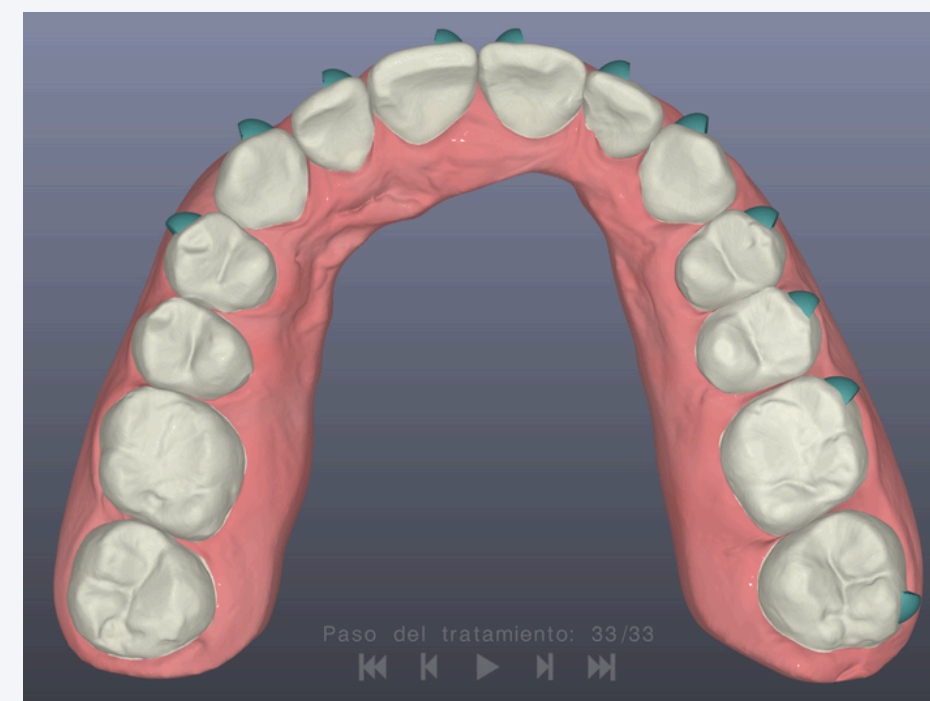


Caso de 40 alineadores

Antes




Después

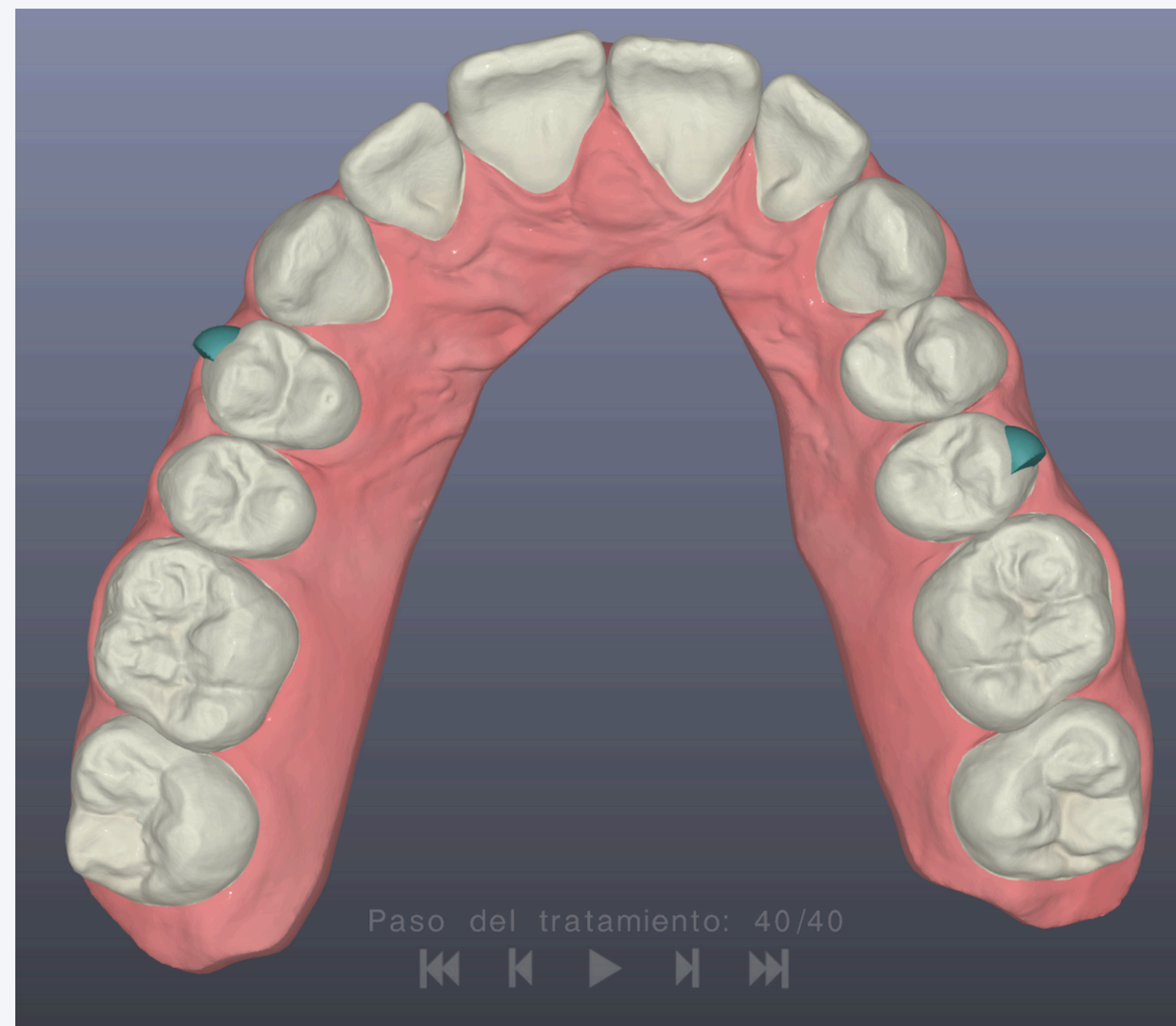


Caso de 40 alineadores

Antes

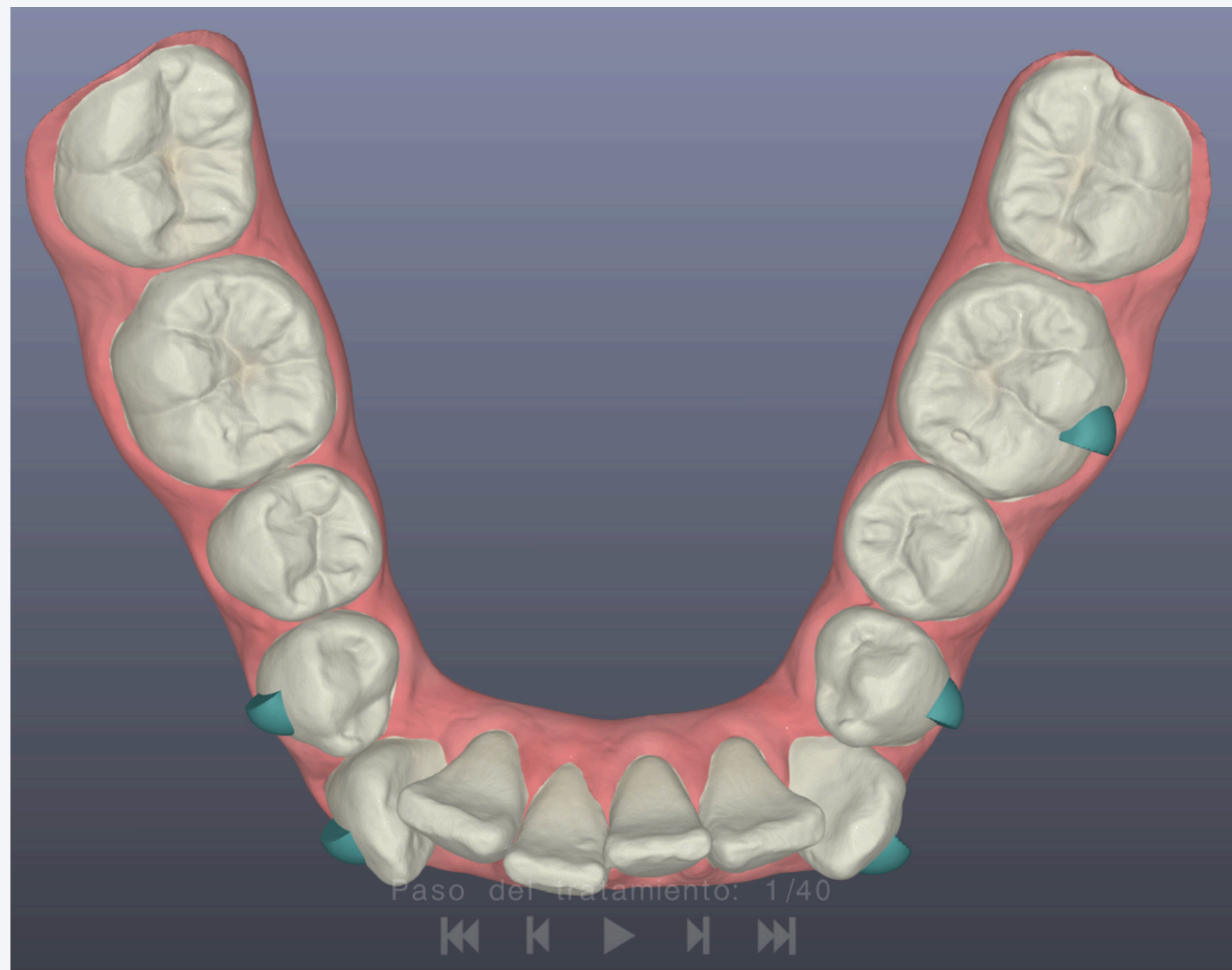

Después

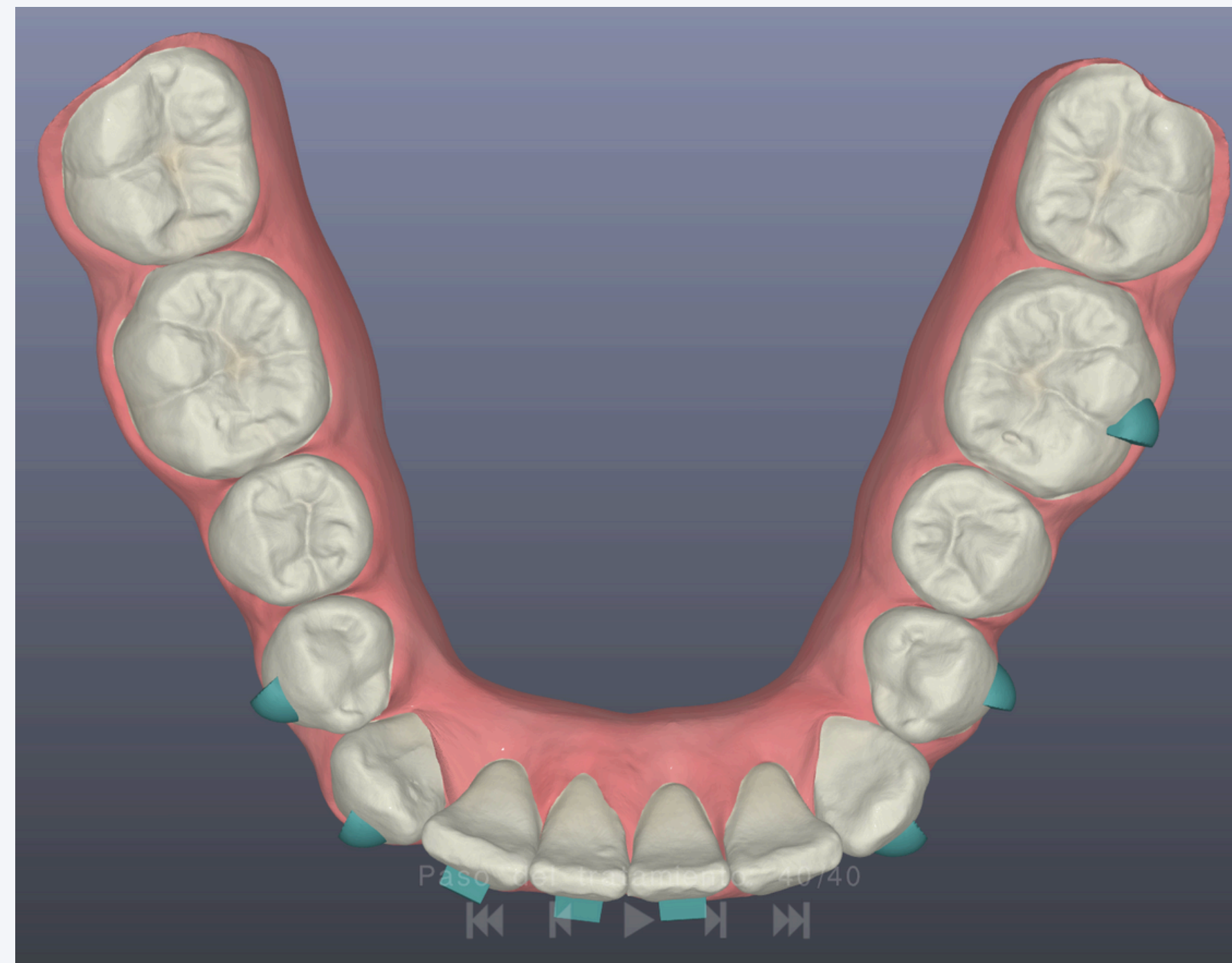

Fotos



¡Contáctenos!

Estamos a su disposición para brinarle más información

Horario de atención

Lunes: 7:00am - 4:00pm

Mar a vie: 7:00am - 4:30pm

Sábados: 7:00am - 11:00am



3124328513
3132857723



6017029221



3132857723



digital3d@gmail.com



@orthorich_lab



Orthorich Laboratorio
de Ortodoncia